

Multi Chair Fastener

Halterungssystem für Tragstühle

Multi Chair Fastener Art.-Nr. 21-0180-006



Multi Chair Fastener Art.-Nr. 21-0180-006

Multi Chair Fastener

Ein einziges Sperrsystem für zahlreiche Tragstühle. Höchste Sicherheit, extrem praktisch.

Das vollkommen neuartige Halterungssystem Multi Chair Fastener – mit 10G Zertifikat - ermöglicht es, jeden Tragstuhl, egal ob mit oder ohne Motorantrieb, dank der Mehrfach-Kompatibilität der Verankerung im Krankenwagen zu fixieren.
Praktisch, intuitiv und sicher.

Mit welchen Tragstühlen ist das Multi Chair Fastener kompatibel?

Dieses neue Sperrsystem ist für alle Ferno Tragstühlen verwendbar, aber nicht nur für diese.
Ist mit folgenden Modellen kompatibel:

**Der gesamten Linie Ferno Venice: Venice Base, Venice Plus, Venice Power;
Ferno Ezglide Power;
Ferno 59-T;
Der Linie 42: Tragstühle 42-E und 42-EV.**

Haben Sie einen Tragstuhl einer anderen Marke? Kein Problem.

Multi Chair Fastener ist auch mit zahlreichen Tragstühlen anderer Hersteller kompatibel.

WAS SPRICHT FÜR DAS VERWENDEN DES MULTI CHAIR FASTENER?


Praktisch und sicher.

Mit dem Multi Chair Fastener kann der Tragstuhl zusammengeklappt im Krankenwagen befestigt werden. Auf diese Weise kann er platzsparend und sicher verstaut werden: Das 10G Zertifikat garantiert seine Zuverlässigkeit. Der Sicherungsgurt sorgt für noch mehr Stabilität.

Wirksam.

Schnelles Verstauen aller Tragstühle. Der senkrechte Arretierbügel ist verschiebbar und kann am roten Griff in der Höhe verstellt werden.

*Dank des Arretierbügels sind je nach Griffhöhe des Tragstuhls unendlich viele Anpassungen möglich:
Eine Gewähr für die Kompatibilität mit unzähligen Tragstühlen unterschiedlichster Marken.*

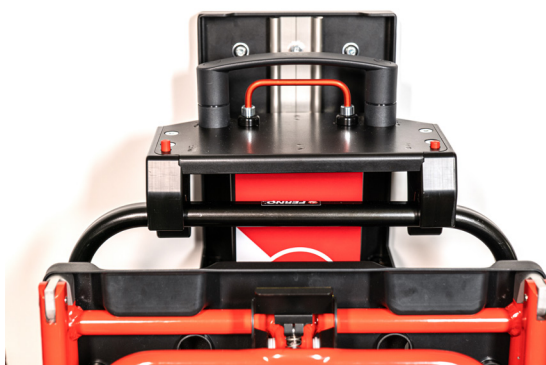

Intuitiv.

Die Vertiefung im Arretierbügel ermöglicht einfaches Verankern des Tragestuhlgriffs und die beiden vorhandenen Anzeigen der korrekten erfolgten Verankerung gewährleisten, dass der Sperrvorgang korrekt erfolgt ist.

Müheless.

Die Verankerung sichert den verstaute Tragestuhl im Krankenwagen, wozu die Räder einfach nur in den spezifischen, am Boden befestigten Aufnahmen eingefahren werden. Der Tragestuhl muss nicht angehoben werden!

Und wie wird er aus der Halterung genommen? Ganz einfach, man braucht nur den roten Griff des senkrechten Arretierbügels anzuheben.



DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN DES MULTI CHAIR FASTENER

- Ist für alle Ferno Trageühle konzipiert und mit Trageühlen anderer Marken kompatibel;
- Senkrechter, verschiebbarer Arretierbügel;
- Am Boden befestigte Aufnahmen für die Räder;
- Im Sperrsystem integrierter Sicherungsgurt;
- Roter, ergonomischer Griff für Höhenverstellung;
- Anzeigen der korrekten Verankerung.

2 Jahre Garantie

ZERTIFIZIERUNGEN

- Zertifikat 10G.
- Zertifiziert gemäß UNI EN 1789.
- Zertifiziert gemäß UNI EN ISO 9001:2018.
- CE-Kennzeichnung.

ARRETIERUNG DES TRAGSTUHLIS

Multi Chair Fastener ist mit einer großen Auswahl handelsüblicher Tragstühle kompatibel.

1. Den Tragstuhl vor dem Verankern im Halterungssystem Multi Chair Fastener zusammenklappen und korrekt arretieren.
2. Die Räder des Tragstuhls in die spezifischen, unten am Multi Chair Fastener-System angebrachten Aufnahmen einschieben.
3. Den Tragstuhl so anordnen, dass er sich unter dem Griff des Multi Chair Fastener-Systems befindet.
4. Den Tragstuhl ordnungsgemäß platzieren und dabei insbesondere auf die Raupenzahnräder des Tragstuhls achten.
5. Den Hauptgriff umfassen, den roten Hebel (Abb. 1) nach oben ziehen und das gesamte System so lange nach unten drücken, bis es am Tragstuhl anliegt und diesen arretiert (Abb. 2/3).
6. Sich anhand der oben am Halterungssystem angebrachten, roten Anzeigen darüber vergewissern, dass die Arretierung korrekt erfolgt ist.

HINWEIS: Wenn die beiden roten Anzeigen hervorstehen, ist das System korrekt arretiert.

7. Zuletzt den Tragstuhl mit dem speziellen Gurt (Abb. 4) fixieren.

Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

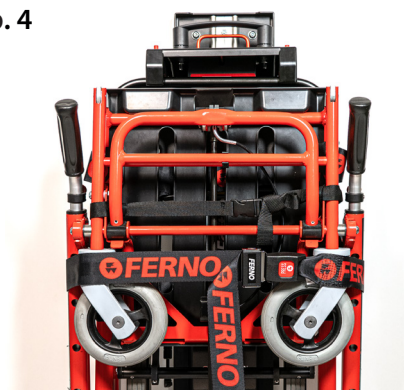



TECHNISCHE DATEN - TRAGSTUHL MULTI CHAIR FASTENER

Art.-Nr. 21-0180-006

Höhe	1154 mm
Breite	631 mm
Tiefe	294,3 mm
Gesamtgewicht	11,5 kg

Multi Chair Fastener