

Multi Chair Fastener

Système de blocage pour chaises portoirs

Multi Chair Fastener code 21-0180-006



Multi Chair Fastener code 21-0180-006

Multi Chair Fastener

Un seul blocage pour de nombreuses chaises. Sécurité maximale, praticité maximale.

Avec le système de blocage révolutionnaire Multi Chair Fastener - Certifié 10G - il est possible de bloquer n'importe quelle chaise, motorisée ou non, à bord de l'ambulance, grâce à la multi-compatibilité du dispositif d'ancrage. Pratique, intuitif et sûr.

Avec quelles chaises le Multi Chair Fastener est-il compatible ?

Le nouveau blocage peut être utilisé avec toutes les chaises Ferno, mais pas seulement. Il est compatible avec les modèles suivants :

Toute la ligne Ferno Venice : **Venice Base, Venice Plus, Venice Power ;**
Ferno Ezgslide Power ;
Ferno 59-T ;
La ligne 42 : les chaises 42-E et 42-EV ;

Vous possédez une chaise d'une autre marque ? Aucun problème ;
Le Multi Chair Fastener est également compatible avec une vaste gamme de chaises de différents fabricants.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC LE MULTI CHAIR FASTENER


Il est pratique et sûr.

Le Multi Chair Fastener permet de bloquer la chaise en configuration fermée dans l'ambulance. De cette manière, il est possible de la ranger dans un espace confiné et en toute sécurité : le certificat 10G garantit sa fiabilité. Pour finir, la sangle d'immobilisation garantit une stabilité supplémentaire.

Il est efficace.

Le rangement se fait rapidement pour toutes les chaises. Le support de blocage vertical est coulissant et permet d'ajuster la hauteur grâce à la poignée rouge appropriée.

Le support de blocage permet des niveaux infinis d'adaptabilité, en fonction de la hauteur de la poignée de la chaise : la compatibilité avec de nombreuses chaises de différentes marques est garantie.

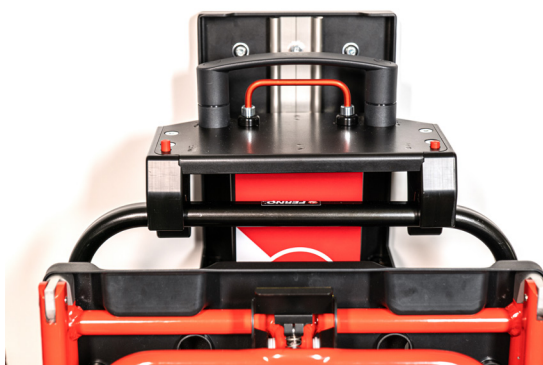

Il est intuitif.

Le renforcement sur le support de blocage permet d'accrocher facilement la poignée de la chaise et la présence de deux indicateurs d'accrochage correct garantit que l'opération de blocage a été effectuée correctement.

Aucun effort.

L'accrochage garantit de ranger la chaise dans l'ambulance en faisant simplement glisser les roues dans les compartiments appropriés fixés au sol. Il n'est pas nécessaire de soulever la chaise !

Et pour la retirer du support ? C'est simple, il suffira de soulever la poignée rouge du support de blocage vertical.



LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MULTI CHAIR FASTENER

- Conçu pour toutes les chaises Ferno et compatible avec des chaises d'autres marques ;
- Support de blocage vertical coulissant ;
- Compartiments pour les roues fixés au sol ;
- Sangle d'immobilisation comprise dans le blocage ;
- Poignée rouge ergonomique pour régler la hauteur ;
- Indicateurs d'accrochage correct.

2 ans de garantie

CERTIFICATIONS

- Certifié 10G.
- Certifié UNI EN 1789.
- Certifié UNI EN ISO 9001:2018
- Marque CE.

BLOPAGE DE LA CHAISE

Multi Chair Fastener est compatible avec une vaste gamme de chaises portoirs présentes sur le marché.

1. Avant de ranger la chaise portoir dans le système de blocage Multi Chair Fastener, fermez-la et bloquez-la correctement.
2. Poussez les roues de la chaise dans les compartiments appropriés situés à la base du système Multi Chair Fastener.
3. Positionnez la chaise de manière à ce qu'elle soit placée sous la poignée du système Multi Chair Fastener.
4. Placez la chaise correctement en prêtant la plus grande attention aux engrenages de la courroie de la chaise.
5. Saisissez la poignée principale en tirant le levier rouge vers le haut (fig.1), en poussant tout le système vers le bas jusqu'à atteindre et bloquer la chaise (fig.2/3).
6. Assurez-vous du blocage correct à l'aide des indicateurs rouges situés dans la partie supérieure du système de blocage (fig.3).

N.B. lorsque les deux indicateurs rouges sont soulevés, le système est correctement bloqué.

7. Pour finir, fixez la chaise avec la sangle appropriée (fig.4).

fig.1



fig.2



fig.3

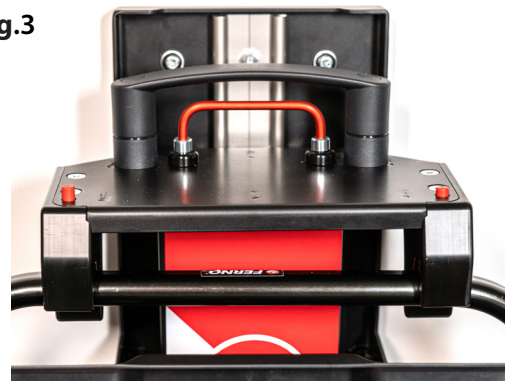


fig.4



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CHAISE MULTI CHAIR FASTENER

code 21-0180-006



Hauteur	1154 mm
Largeur	631 mm
Profondeur	294,3 mm
Poids total	11,5 kg

Multi Chair Fastener