


Istruzioni di assemblaggio del PIN antiperdita

1

Configurazione iniziale per partire con il montaggio.

Da notare che il perno antiperdita va montato sulla V-Shaped con **codice colore rosso-giallo**.

Questo è il supporto che presenta un foro passante (non filettato) sulla piastra di giunzione che collega i due bracci (a differenza del supporto blu-verde, che invece ha un foro filettato).

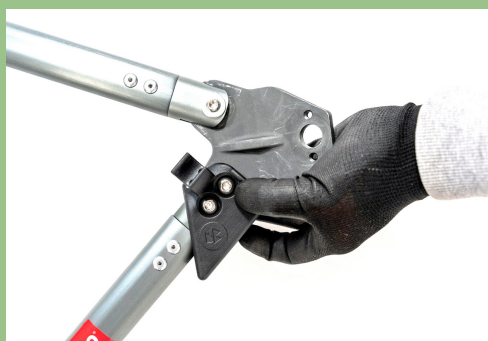
2

Posizionare mezzo guscio del perno antiperdita sul lato esterno dalla V-Shaped.

Il guscio va posizionato in modo che il logo Ferno in rilievo risulti verso l'esterno e in modo che i fori combacino con le teste bombate a vite esagonale.

3

Ruotare la V-Shaped come mostrato nell'immagine di riferimento, per facilitare i passaggi successivi.

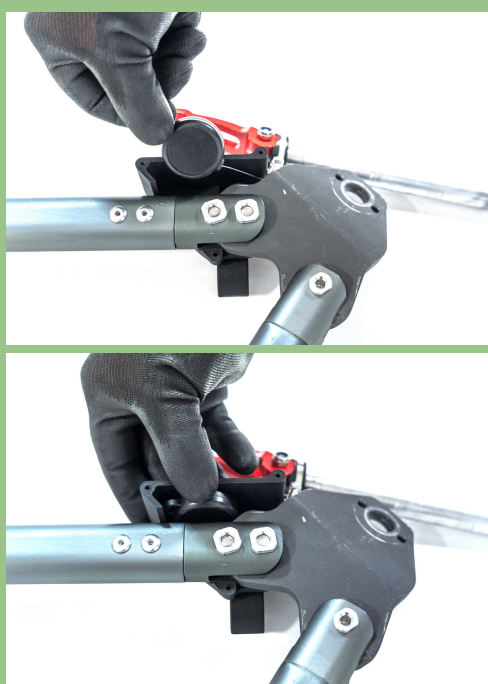4

Inserire il supporto del cavo retrattile nell'apposita sede all'interno del guscio.

Assicurarsi che il PIN rimanga all'esterno del guscio durante il posizionamento.


5




Posizionare il secondo guscio in modo da racchiudere completamente il supporto del cavo.
Utilizzare le tre viti incluse per fissare insieme i due gusci.
Stringere con attenzione per garantire un montaggio sicuro, senza danneggiare i componenti.



6

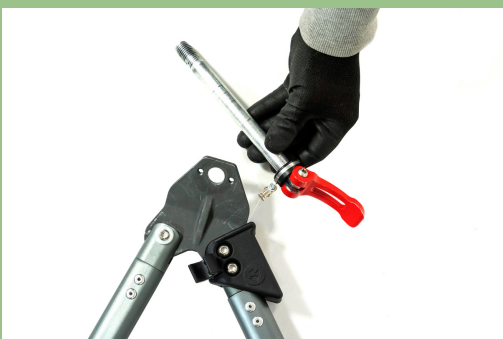

IL PIN antiperdita è ora installato correttamente e pronto all'uso.

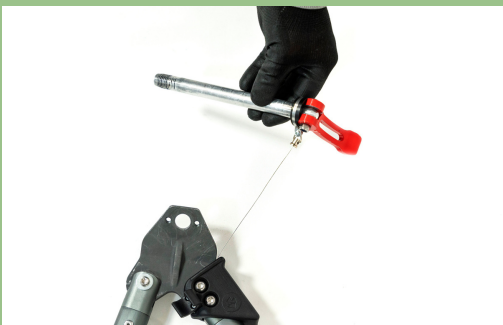

7



Quando non in uso, il PIN può essere stoccato nell'apposito alloggiamento presente sul guscio in plastica.
Prestare attenzione al verso corretto in cui posizionare il PIN.

STOCCAGGIO CORRETTO DEL PIN



STOCCAGGIO ERRATO DEL PIN